

Holdbarhet analyser

Serumprøver som ikke sendes avdelingen med en gang, oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse. Serum må da være skilt fra blodlegemene. Prøver sendes laboratoriet mandag - torsdag.

Hvis prøvene tas på fredag kan de ikke sendes i posten samme dag. Må ev. sendes med Bedriftspakke Express Over Natt.

Prøver med spesiell prøvetaking/oppbevaring:

Analyse	Prøvemateriale	Holdbarhet/Oppbevaring	Kommentar
Zopiklon	Serum	Zopiklon er ustabil i serumprøver uten nedkjøling, og konsentrasjonen kan reduseres under lagring og forsendelse i romtemperatur. Vi anbefaler derfor å oppbevare prøven kjølig i påvente av transport, og sende prøven nedkjølt - spesielt dersom det kvantitative prøvesvaret er av betydning.	
Olanzapin	Serum	Romtemperatur = 7 timer 2-8 °C (ved lyseksponering) = 7 dager 2-8 °C (lysbeskyttet) = 14 dager	Serum avpipetteres, lysbeskyttes og settes i kjøleskap i påvente av forsendelse

Se ellers våre anbefalte prøvetakingsprosedyrer på www.stolav.no/farma