

Holdbarhetsoversikt – Prøver til medisinsk genetiske analyser

Medisinsk genetisk laboratorium har stengt lørdag og søndag (og helligdager).

Analyser som ikke er nevnt i dette dokumentet kan forsendes som vanlig.

Se også vår brukerhåndbok på www.genetikportalen.no

Analyse	Holdbarhet i romtemperatur	Kommentar
NF1- og/eller NF2 Samt alle andre RNA-analyser	4 dager (også 4 dager i kjøleskap)	<p><u>Prøvemateriale:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ett 4 ml rør heparin-blod (Na eller Li, uten gel) <p>og</p> <ul style="list-style-type: none"> Ett rør EDTA-blod <p><u>Prøvetaking:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Blod-rørene må fylles helt Ikke benytt glass med gel eller kuler Oppgi prøvetakingstidspunkt på rekvisisjon og/eller glass Bland glasset godt etter prøvetaking. <p><u>Forsendelse av prøver:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Prøven <u>skal</u> tas og sendes <u>mandag</u> eller <u>tirsdag</u> Prøver som ikke sendes til riktig tidspunkt vil ikke bli dyrket og analysert. Konvoluttene med prøvene merkes: "Blodprøve til dyrkning" og "Hasteprøve". <p><u>Info om metode:</u> Lymfocytter fra blodprøvene dyrkes i korttidskultur 4-5 dager. Av hensyn til høstingstidspunkt må derfor blodprøven mottas på laboratoriet og settes til dyrking tirsdag eller onsdag.</p>