
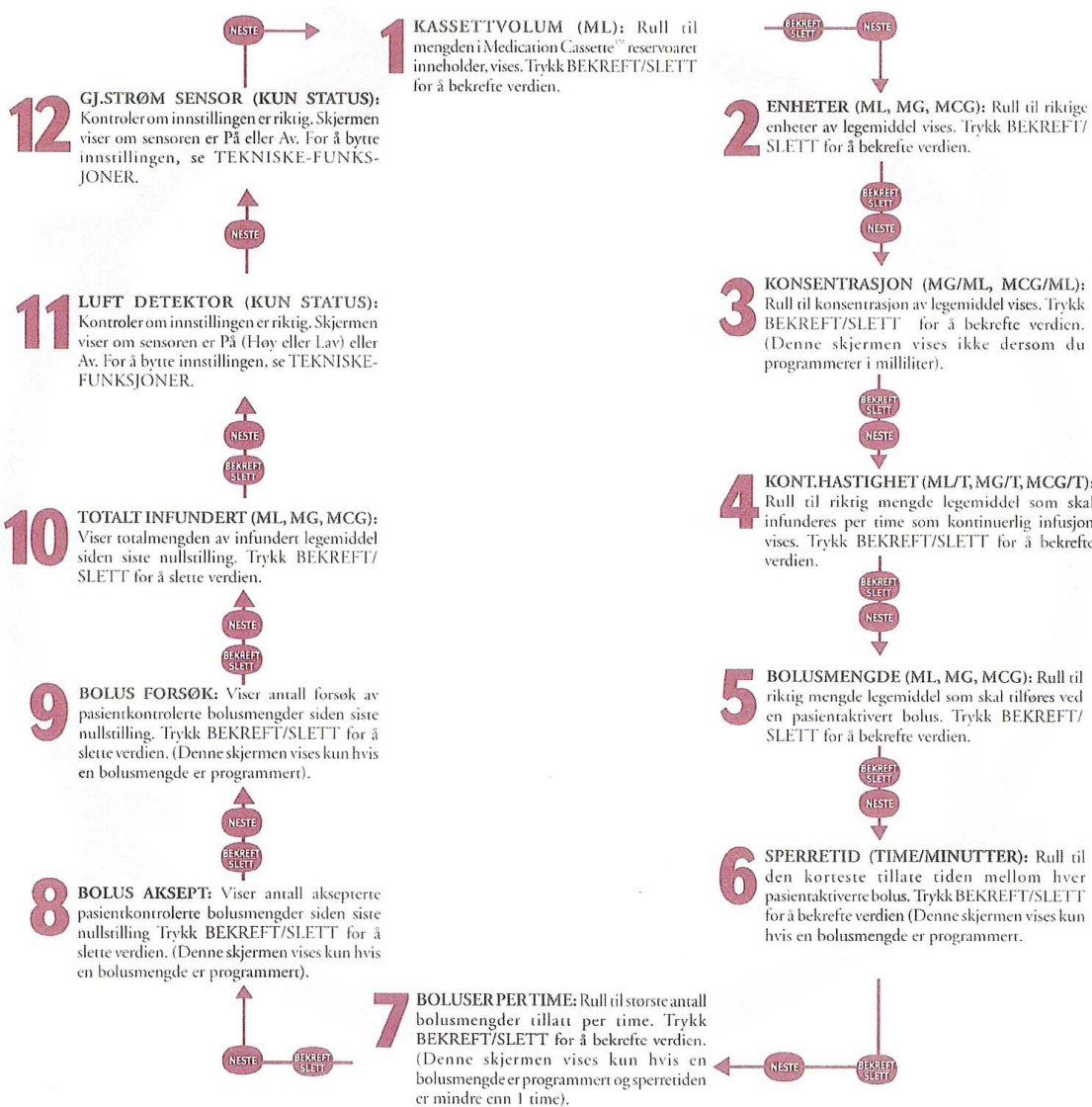


# Opplæringsguide

## CADD-Legacy® PCA Pumpe Modell 6300

Installer nye batterier i batterirommet.  
Skyv batterilokket til det lukkes.

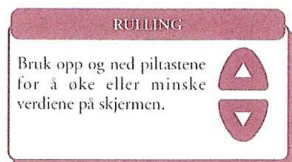

EQS-id: 22869

Vedlegg til prosedyre 4916 : Medikament-/smertepumpe – utlån og bruk

Endret: 28.06.12

# Opplæringsguide

## CADD-Legacy® PCA Pumpe Modell 6300

### INFUSJONSPROFIL FOR CADD-Legacy® PCA Pumpe Modell 6300



#### ANDRE PUMPEFUNKSJONER

**Starte pumpen:** Trykk og hold START/STOPP til Starter og (-----) forsvinner én etter én fra skjermen. Slipp START/STOPP-tasten. INF vises på skjermen.

**Stopp pumpen:** Trykk og hold START/STOPP til Stopper og (-----) dukker opp én etter én på skjermen. Slipp START/STOPP-tasten. STOPPET vises på skjermen.

**Settets påfylling:** Når pumpen er stoppet og i LN0 eller LN1, trykk og hold FYLLE SETT til ordene FYLLE SETT vises på skjermen, fulgt av (-----) som dukker opp én etter én. Slipp FYLLE SETT. Trykk og hold FYLLE SETT inntil væskebanen er luftfri. Trykk NESTE for å gå ut av Fylle Sett-skjermen.

**ADVARSEL:** Ikke fyll væskebanen med slangen festet til en pasient da dette kan føre til overinfusjon av legemiddel eller luftemboli.

**For å skru på pumpen:** Trykk PÅ/AV: Pumpen bipper mens den går igjennom sine aktiveringsrutiner.

**For å skru av pumpen:** Trykk og hold PÅ/AV til (\*\*\*\* \*) dukker opp, én etter én og Skruer Av vises på skjermen. Skjermen blir blank siden pumpen går over til hvilestilling..

**Hvordan infundere en Kliniker bolus (mcg, mg, ml):** Pumpen må være i gang. Trykk LÅS slik at koden vises. Trykk (▲) eller (▼) til Kliniker bolus-koden vises. Trykk LÅS eller BEKREFT/SLETT og da vil 00.0 vises. Trykk (▲) inntil ønsket bolusmengde vises (mcg, mg, ml). Trykk enten BOLUS eller BEKREFT/SLETT for å starte kliniker bolus. Dersom du ønsker å stoppe en kliniker bolus, trykk og hold START/STOPP for å stoppe pumpen.

**Merke:** Hvis pumpen er programmert i MG, vises MG på skjermen; hvis pumpen er programmert i ML, vises ML på skjermen, og hvis pumpen er programmert i MCG, vises MCG på skjermen.

#### HVORDAN ENDRE LÅSENIVÅER

**Pumpen må være stoppet.**

1. Trykk LÅS for å se det aktuelle låsenivået.
2. Trykk (▲) eller (▼) til ønsket Låse nivå vises (LN0, LN1, LN2).
3. Trykk LÅS eller BEKREFT/SLETT. Kode og 0 vises.
4. Trykk (▲) eller (▼) til Låse nivå-koden vises.
5. Trykk LÅS eller BEKREFT/SLETT for å bekrefte det nye låsenivået.

*Trykk LÅS igjen for å verifisere det nye låsenivået.*

**LÅSE NIVÅ 0 (LN0) er programmeringsnivået.**

**LÅSE NIVÅ 1 (LN1)** lar pasienten starte og stoppe pumpen, fyller slangesettet, tilbakesille kassettvolumet og slette alle TOTALT INFUNDERT-skjerner. Den kontinuerlige hastigheten og bolusmengden kan minskes og økes opp til verdiene som er programmert i LN0.

**LÅSE NIVÅ 2 (LN2)** lar pasienten stoppe og starte pumpen og tilbakesille kassettvolumet.

#### TEKNISKE FUNKSJONER

**Pumpen må være stoppet og i LN0. For å få tilgang til Tekniske funksjoner:**

1. Trykk LÅS
  2. Trykk LÅS eller BEKREFT/SLETT. Kode og 0 vises.
  3. Trykk (▲) eller (▼) til biomedkoden vises.
  4. Trykk LÅS eller BEKREFT/SLETT.
  5. Trykk NESTE for å gå igjennom innstillingene.
- For å skru Luft detektoren PÅ-HØY, PÅ-LAV eller AV:**
6. Trykk NESTE til LUFT DETEKTOR vises.
  7. Trykk (▲) eller (▼) til ønsket innstilling vises.
  8. Trykk BEKREFT/SLETT.

**ADVARSEL:** Når Gj.stromnings sensoren er slått av, detekterer ikke pumpen om det er luft i væskebanen. Undersøk væskebanen regelmessig og fjern evt. luft for å forebygge luftemboli.

**For å skru Gj.Strom sensor PÅ/AV:**

9. Trykk NESTE til GJ.STROM SENSOR vises.
10. Trykk (▲) eller (▼) til ønsket innstilling vises.
11. Trykk BEKREFT/SLETT.

**ADVARSEL:** Når sensoren for okklusjon på væskesiden er slått av, detekterer ikke pumpen okklusjoner på væskesiden (mellom pumpen og kassetten). Undersøk kassetten ved mellomrom for redusert kassettvolum og undersøk væskebanen for floker, en lukket klemme eller andre obstruksjoner på væskesiden. Okklusjoner på væskesiden kan føre til under-okklusjoner på væskesiden kan føre til under-infusjon av legemidler.

**For å gå ut av Teknisk:**

12. Trykk NESTE til NESTE = TEKNISK, BEKREFT = PROGR vises.
13. Trykk BEKREFT/SLETT for å gå tilbake til hovedskjermen.

**Deltec**

SIMS Deltec, Inc., St. Paul, MN 55112 U.S.A.

**SMITHS INDUSTRIES**  
Medical Systems



CADD-Legacy og Medication Cassette, er varemerker som tilhører SIMS. (Symbolet © betyr at varemerket er registrert ved U.S. Patent and Trademark Office og i forskjellige andre land).  
©2000 SIMS Deltec, Inc. Alle rettigheter forbeholdt. Trykt i U.S.A. 12/00 49733-13

**ADVARSEL:** Dette Rask Referansekortet bør kun brukes av klinikere. Ikke la pasienter få adgang til kortet, da informasjonen ville la dem få tilgang til programmering og driftsfunksjoner. Les igjennom hele Operatormanualen for du bruker CADD-Legacy® berbar infusjonspumpe. Dersom man unnlater å følge advarsler, forsiktighetsregler og anvisninger kan dette medføre død eller alvorlig skade på pasienten. Dersom pumpen faller ned eller får støt, undersøk om den er blitt skadet. Ikke bruk en Pumpe som er skadet eller som ikke fungerer riktig.

EQS-id: 22869

Vedlegg til prosedyre 4916 : Medikament-/smertepumpe – utlån og bruk

Endret: 28.06.12