

Kortbruksanvisning for BodyGuard 323

Knapper og funksjoner





1. Skjerm

- Viser pumpe- og infusionsstatus
- Viser programmeringsalternativ og anvisninger



2. STOPP/NEI

- Stopper infusjon
- Deaktiverer lydalarm
- "Pauser" fylling av sett
- Nullstiller vist verdi under programmering



3. START/OK

- Starter infusjon
- Bekrefter alternativ og innstilling



4. FYLLING(PRIMING)/BOLUS

- Trykker du på fyllings-/bolusknapp under innstilling av data: Aktiveres fyllingsprosedyren. Et diagram vises på skjermen, det viser fyllingsvolum med nåværende verdi, som øker til det når innstilt volum.
- Trykker du på fyllings-/bolusknappen under PCA-programdrift: Aktiveres bolusprosedyren.
- Trykker du på fyllings-/bolusknappen under PCA-programdrift og pumpen er stoppet : Aktiveres klinikerbolus funksjonen



5. Strøm PÅ/AV

- Slå PÅ systemet ved å holde knappen inntrykt til selvtestskjermen vises
- Steng AV systemet ved å holde knappen inntrykt til diagrammet blir rødt og et lydsignal høres



6. Lås

- Låser knappene for å forhindre at innstillinger endres



7. Informasjon

- Viser informasjon om pumpen og valgt program/innstillinger, brukes for å nå "meny"



8. Sifferknapper

- Skriver numeriske parametre under programmering



9. Piler

- Blar opp, ned, til venstre og til høyre blandt alternativene



10. Driftsindikator

- *Grønn indikator*
 - Tennes under systemets selvtest
 - Blinkende grønn lampe indikerer pågående infusjon

210 x 297 mm

Montere settet i pumpen

Gjør som følger:



1. Åpne luken ved å felle ut sperren på høyre side av pumpen (sett forfra)	1
2. Montere settet i henhold til bildet ovenfor. Den svarte settnøgkelen passer inn i rett posisjon i sitt feste	2
3. Trykk den blå ringen inn i sitt feste	3
4. Trykk ned settet i sitt spor på høyre og venstre side. Steng luken. Luken kommer til å gi en viss motstand når den stenges, det er helt normalt.	
5. Åpne klemmen på settet	