

## BRUKERVEILEDNING

### URIN OVERFØRINGSSENHET



Overføringsenhet



Vakumrør

Vakumrør m/borsyre  
har en svart ring på  
korken



1 Overfør urinen så snart som mulig etter prøvetaking. Hvis henstand, bland opp før overføring til vakumrøret. Sett det hvite røret på overføringsenheten ned i urinen



2 Sett vakumrøret ned i den gule enden av overføringsenheten og trykk det ned slik at korken på røret perforeres av nålen i overføringsenheten. Vakumet i røret gjør at urinen suges inn i vakumrøret.



3 Trekk vakumrøret ut av overføringsenheten når det er fylt med riktig mengde (når det ikke er mer vakum igjen i røret).



4 Dersom vakumrøret inneholder borsyre (for mikrobiologiske undersøkelser), må urin og borsyre blandes ved å vende urinrøret opp-ned minimum 5 ganger.